



# Aufbau Gesichtsschild


## Setup instruction of face shield

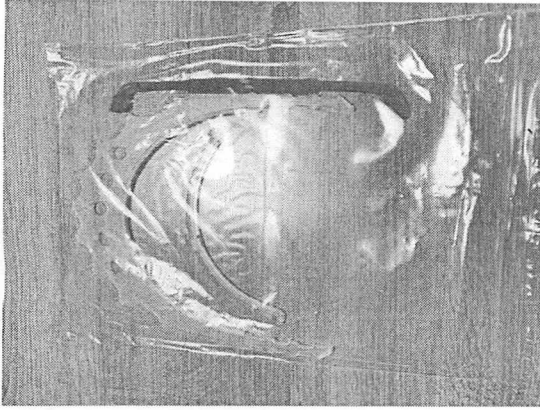


Set Gesichtsschild  
Set face shield

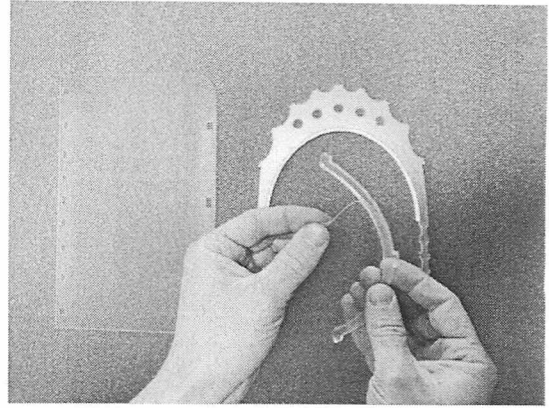


Bei allen Teilen Folie beidseitig entfernen  
Remove foil on both sides of each part

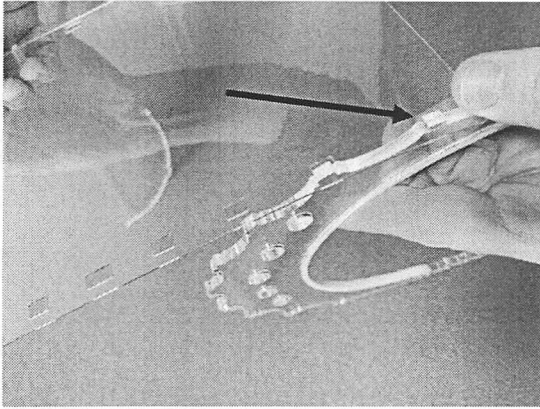


Schild mit äußerem Loch an äußerem Pinn vom Kopfteil fixieren -  
Fix outer hole of visor to outer pin of head piece

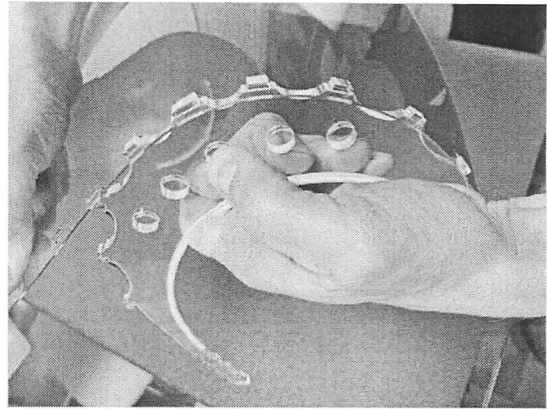


Den kompletten Schild bis auf die andere Seite über die Pinne ziehen  
Pull whole visor completely across the pins up to the opposite side

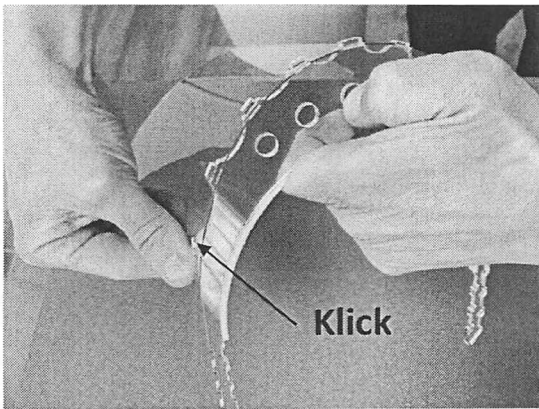


Auf der gegenüberliegenden Seite Einrasten lassen  
Let it klick in on the opposite side

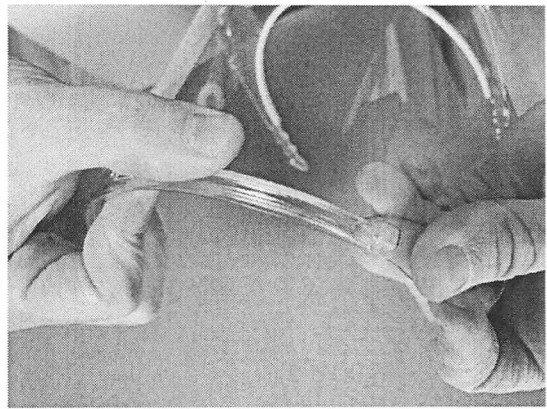

Den unteren Bügel wie oben Einrasten lassen - Let klick in the lower hoop the same way as above

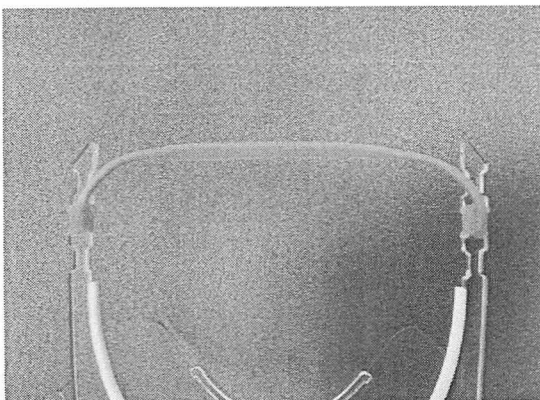

Gummiband über den Bügel ziehen  
Pull rubber strap over the hoop

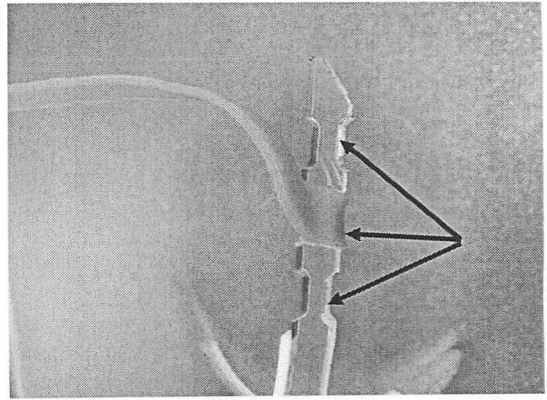

3 Fach verstellbar  
Three times adjustable